



BS Dezon S

Käte ja pindade desinfitseerimisvahend.

BS Dezon S on isikliku hügieeni desinfitseerimisvahend, pindade desinfektsioonivahend ja toiduainetööstuse valdkonna (1, 2 ja 4 tüübi biotsiid) desinfektsioonivahend. Kasutatakse käte hügieeniliseks desinfitseerimiseks; väikeste pindade kiireks desinfitseerimiseks meditsiinasutustes (protseduuride kabinettides, odontoloogilistes kliinikutes jne), samuti toiduainetööstuses ja tootlustusettevõtetes.

BS Dezon S:

- bakteritsiidse, fungitsiidse, virutsiidse ja tuberkulotsiidse toimega desinfitseerimisvahend;
- võib kasutada pindade desinfitseerimiseks aerosool generaatorite abil;
- täpselt vastavalt kasutusjuhendile kasutamisel on see efektiivne ümbrisega (lipofiilsete) viiruste rühma vastu, kuhu kuulub ka SARS-CoV-2 (2019-nCoV) viirus.

Toote koostis

Vaata etiketilt või ohutuskaardilt.

Kasutusjuhised

Toode on kasutusvalmis.

Käte hügieeniline desinfitseerimine. Valada 3 ml toodet peopesasse, masseerides hõõruda nahka, käed peavad olema 30 sekundi jooksul niisked. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja nahka pesta.

Pindade desinfitseerimine. Pihustada **BS Dezon S**-ga puhtaid pindu, seadmeid, tööriistu või nende osi 30 cm kauguselt või puhastada neid niisutatud puhta lapiga nii, et pind oleks täielikult niisutatud. Pihustada mitte rohkem kui 50 ml / m². Toimimise aeg sõltuvalt saastumisest 5 - 15 min. Lasta kuivada. Instrumendid ja pinnad peale desinfitseerimist ei vaja pesemist. Kui kahtlete, et toode võib töödeldavat pinda kahjustada, proovige seda alati väikesel alal.

Ohutu kasutamise alane teave

Hoida hermeetiliselt suletud originaalpakendis kuivas, ventileeritavas ruumis. Mitte hoida koos tuleohtlike ainete ja vahenditega. Pakendit mitte vigastada. Mitte suitsetada. Mitte kasutada sädemeid tekitavaid tööriistu. Mitte hoida temperatuuril alla -15°C ja üle +25°C eemal soojusallikatest, päikesevalgusest. Mitte kasutada näonaha ja limaskestade desinfitseerimiseks, haavade või naha kahjustuste raviks.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatolek	Vedelik
Värvus	Värvitu, läbipaistev
Lõhn	Iseloomulik (alkohol)
pH, 100 %, 25°C	5 – 7
Suhteline tihedus, gr/cm ³ , 20°C	0,855 – 0,865

Säilivusaeg

3 aastat alates valmistamiskuupäevast.

Mikrobioloogiliste uuringute tulemused

Uuringud viidi läbi EN 1276:2010, EN 1276:2010/AC: 2010, EN 1650:2008+A1:2013, EN 14476:2013+A1:2015(N), EN 14348:2005 meetodite abil.

Tingimustel, et **BS Dezon S** koostis ei ole lahjendatud, on temperatuur võrdne 20 ° C ja puhtuse tingimused on täidetud, seega standardse ajavahemiku jooksul: see omab aktiivset bakteritsiidset, fungitsiidset toimet (*E.coli*, *E.hirae*, *C.albicans*, *S.aureus*, *P.aeruginosa*).

Tingimustel, et **BS Dezon S** koostis ei ole lahjendatud, on temperatuur võrdne 20 ° C, puhtuse tingimused on täidetud ja toimimisaeg on 10 minutit: see omab aktiivset virutsiidset toimet (1. tüüpi polüoviirus, adenoviiruse tüüp 5, ATCC VR-5, hiire noroviirus S99, virus vaccinia ATCC VR-1508).

Tingimustel, et **BS Dezon S** koostis ei ole lahjendatud, on temperatuur võrdne 20 ° C ja puhtuse tingimused täidetud, seega standardse ajaperioodi jooksul: see omab aktiivset tuberkulotsiidset toimet (kasutades *Mycobacterium terrae*).